

# CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

## GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

### ¡IMPORTANTE!

- Esta prueba se puede utilizar durante los diez días posteriores a la aparición de los síntomas de COVID-19.
- Esta prueba está aprobada para su uso casero por parte de personas de más de 12 años. La recogida de muestras de hisopado nasal de personas de menos de 12 años o de más de 70 debe estar a cargo de adultos o supervisada por adultos.
- La preparación de la prueba y la solución tampón deben estar a temperatura ambiente (15–30°C) antes de iniciar la prueba.
- Antes y después de realizar la prueba, lávese las manos o desinfectelas.
- Tome las medidas de seguridad necesarias al realizar pruebas en otras personas (p. ej., mascarilla, guantes).


Si tiene preguntas sobre el uso de la prueba o sobre la lectura de los resultados, llame al servicio de atención al cliente. Internet: [www.clinitest.siemens-healthineers.com](http://www.clinitest.siemens-healthineers.com)

### PRIMEROS PASOS


- Contenido del kit
- Hisopos estériles (5)
  - Dispositivos de prueba (5)
  - Tubos de extracción con solución tampón y puntas (5)
  - Instrucciones de uso (1)
  - Guía de consulta rápida (1)

### ARTÍCULOS REQUERIDOS PERO NO SUMINISTRADOS

Reloj, temporizador o cronómetro y bolsa de plástico para residuos.

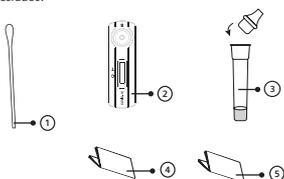

### PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

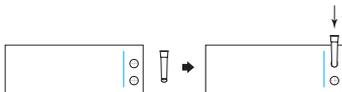

**Paso 1.** Introduzca el tubo en la estación de trabajo. Quite la tapa de la parte superior del tubo.



**Paso 4.** Gire el hisopo al menos 5 veces mientras lo presiona contra la parte interna de la nariz. Asegúrese de que se produzca un buen contacto entre el hisopo y la parte interna de la nariz.

**Paso 5.** Retire el hisopo e introdúzcalo en la nariz derecha. Repita los pasos 3 y 4.




**Paso 10.** Retire el hisopo y deséchelo en una bolsa de plástico.




**Paso 11.** Empuje la punta proporcionada en el kit al interior del tubo y asegúrese de que encaje de manera firme.

**Paso 15.** Lea los resultados. Existen tres tipos de resultados posibles.

#### Resultado positivo de la prueba

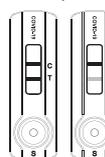

Si el dispositivo de prueba tiene el aspecto de cualquiera de las ventanas de resultado positivo que se muestran a la izquierda, actualmente está infectado por COVID-19. Llame al médico o al Ministerio de Sanidad local y asegúrese de cumplir todas las directrices para el autoaislamiento. Puede ser necesario repetir la prueba con otros métodos, como la prueba de PCR.

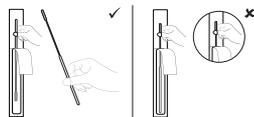

**Paso 2.** Abra el paquete de hisopos por la marca. Extraiga el hisopo sosteniéndolo por el extremo de plástico. No toque la punta absorbente del hisopo.




**Paso 6.** Retire el hisopo de la nariz e introdúzcalo en el tubo preparado que se encuentra en la estación de trabajo.



**Paso 7.** Mezcle bien girando el hisopo al menos 6 veces mientras presiona el cabezal contra el fondo y los laterales del tubo.

#### Vierta aquí 4 gotas de solución

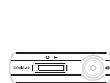

**Paso 12.** Retire el dispositivo de prueba de la bolsa y apóyelo sobre una superficie plana limpia.



**Paso 13.** Añada 4 gotas de la solución en el pocillo de muestra del dispositivo de prueba apretando suavemente el tubo.



**Paso 3.** Con cuidado, introduzca la punta absorbente del hisopo en la nariz izquierda. Asegúrese de que toda la punta del hisopo esté dentro de la nariz (2–4 cm de profundidad). No intente insertar más el hisopo tras sentir resistencia.



**Paso 8.** Inicie el temporizador. Deje el hisopo en el tubo durante 1 minuto.




**Paso 9.** Apriete el tubo varias veces desde el exterior. Intente disolver tanta solución del hisopo como sea posible.



**Paso 14.** Inicie el temporizador y lea los resultados tras 15 minutos. Es importante leer los resultados a los 15 minutos.

#### Resultado no válido de la prueba

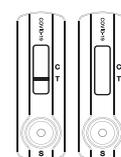

Si el resultado de la prueba tiene un aspecto diferente; es decir, si no hay una línea visible o una sola línea en la zona de T, el resultado es no válido. Esto puede deberse a la realización de la prueba y esta debe repetirse. Si continúa obteniendo resultados no válidos, póngase en contacto con el médico o con un centro de pruebas de COVID.



### ÍNDICE DE SÍMBOLOS

	Consultar las instrucciones de uso		Pruebas por kit		Representante autorizado
	Para uso exclusivo de diagnóstico in vitro		Fecha de caducidad		No reutilizar
	Almacenar entre 2–30°C		Número de lote		N.º de catálogo
					Fabricante

Healgen Scientific Limited Liability Company  
Dirección: 3818 Fugua Street, Houston, TX 77047, USA.  
Tel: +1 713-733-8088 Fax: +1 713-733-8848  
Página web: [www.healgen.com](http://www.healgen.com)

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)  
Dirección: Eifestrasse 80, 20537 Hamburg, Alemania

GCCOV-502a-HS  
(11556329)



Fecha de revisión: 2021-05-20  
B22214-01  
Rev. A